



Desinfectante ámbito clínico para superficies

Nº Reg AEMPS 665-DES

- ✓ **Sin aldehídos**
- ✓ **Rápido secado**
- No necesita aclarado.**
- ✓ **Con inhibidores de corrosión**

Propiedades:

Desinfectante de alto nivel para todo tipo de superficies lavables.
Solución hidroalcohólica con tensioactivos catiónicos e inhibidores de corrosión.

Espectro de acción:

Bactericida, levaduricida, fungicida, esporicida.

Composición:

Etanol	48,00 g
Propan-2-ol	26,00 g
Propionato de amonio cuaternario	0,75 g
Agua y excipientes	c.s.p.100g

Modo de empleo:

Limpieza previa: mediante arrastre húmedo retirar los restos de la zona a tratar. Pulverizar el producto puro homogéneamente sobre toda la superficie, garantizando que queda húmeda durante al menos 3 minutos, dejando actuar el producto. Frotar con una bayeta limpia hasta su evaporación.

Cumple las normas europeas:

- ♦ UNE-EN 13697 (*)

(*) Condiciones sucias

Actividad	Microorganismo	Tiempo
Bacterida (100%)	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	1 minuto
Bacterida (50%)	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	5 minutos
Fungicida (100%)	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 minutos
Levuricida (100%)	<i>Candida albicans</i>	1 minuto

Presentación:

SALLÓ KYRA, S.L. posee autorización para la fabricación de productos desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta.
Número de autorización de la AEMPS: nº 0471-DS.



Botellas de 75ml con pulverizador	Cajas de 50 unidades
Botellas de 750ml con pulverizador	Cajas de 12 unidades
Garrafas de 5000ml	Cajas de 4 unidades