



Desinfectante ámbito clínico para superficies

Nº Reg AEMPS 665-DES

- ✓ Sin aldehídos
- ✓ Rápido secado
- ✓ No necesita aclarado.
- ✓ Con inhibidores de corrosión

Propiedades:

Desinfectante de alto nivel para todo tipo de superficies lavables.

Solución hidroalcohólica con tensioactivos catiónicos e inhibidores de corrosión.

Espectro de acción:

Bactericida, levaduricida, fungicida, virucida, micobactericida, tuberculicida, esporicida.

Composición:

Etanol	48,00 g
Propan-2-ol	26,00 g
Propionato de amonio cuaternario	0,75 g
Agua y excipientes	c.s.p.100g

Modo de empleo:

Limpieza previa: mediante arrastre húmedo retirar los restos de la zona a tratar. Pulverizar el producto puro homogéneamente sobre toda la superficie, garantizando que queda húmeda durante al menos 3 minutos, dejando actuar el producto. Frotar con una bayeta limpia hasta su evaporación.

Cumple las normas europeas:

- ♦ UNE-EN 13697 (*)
- ♦ UNE-EN 14561 (*)
- ♦ UNE-EN 14562 (*)
- ♦ UNE-EN 14563 (*)
- ♦ UNE-EN 14476 (*)
- ♦ UNE-EN 13704

(*) Condiciones sucias (BSA + eritrocitos)

Microorganismo

Tiempo

Bacterida	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae</i>	1 minuto
Levaduras	<i>Candida albicans</i>	1 minuto
Hongos	<i>Aspergillus niger</i>	3 minutos
Virus	<i>Adenovirus 5</i>	3 minutos
Micobacterias	<i>Mycobacterium avium, Mycobacterium</i>	3 minutos
Esporas	<i>Bacillus subtilis ATCC 6633</i>	15 minutos

Presentación:

SALLÓ KYRA, S.L. POSEE AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DESINFECTANTES DE ÁMBITO CLÍNICO Y ANTISÉPTICOS DE PIEL INTACTA. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA AEMPS: nº 0471-DS.



Botellas de 75ml con pulverizador	Cajas de 50 unidades
Botellas de 750ml con pulverizador	Cajas de 12 unidades
Garrafas de 5000ml	Cajas de 4 unidades